




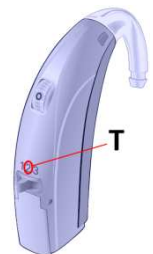


CONSEILS D'UTILISATION DE LA SOLUTION COMFORT DUETT

Installation : Posez le Comfort Duett sur le comptoir dans sa base de chargement reliée au secteur.
Positionnez les autocollants fournis pour signaler l'accessibilité de votre établissement.

- 1 Retirez le Comfort Duett de sa base de chargement. Veillez à le replacer après utilisation.
- 2 La personne est-elle équipée d'un appareil auditif avec la position « T » ?
 - ➔ Si oui : reliez le **collier magnétique** au Comfort Duett, et demandez à la personne de le porter autour du cou et de positionner son appareil auditif sur «T».
 - ➔ Si non : reliez le **casque** au Comfort Duett, et demandez à la personne de le placer sur ses oreilles.
- 3 Mettez le volume sur 0 à l'aide de la molette.  Allumez en poussant le bouton sur la position **Mic/Tv** (la diode verte s'allume). 
- 4 La personne peut ajuster le volume et orienter le Comfort Duett vers son interlocuteur (le microphone se situe sur sa partie supérieure).
- 5 Eteignez en poussant le bouton vers le bas.

 *La position « T » d'un appareil auditif permet de se focaliser sur les sons captés par un microphone grâce au champ magnétique créé par le collier magnétique. La personne malentendante peut ainsi se concentrer sur la voix de son interlocuteur.*



Le Comfort Duett semble ne pas fonctionner :

- ✓ Assurez-vous d'être sur le mode Mic/Tv de l'appareil et que la diode verte est allumée (le mode T, avec la diode orange allumée, remplace un appareil auditif en position T, et sera utilisé en présence d'une boucle magnétique externe au Comfort Duett).
- ✓ Veillez à ce que l'appareil soit chargé. La diode verte du chargeur doit être allumée lorsque le Comfort Duett est placé correctement dans sa base. (autonomie de 15 à 20 heures, rechargement en 8 à 10 heures).
- ✓ Référez-vous au mode d'emploi détaillé fourni avec le Comfort Duett.

