



## Conseil d'utilisation de : COUNTER LOOP

*Pour les personnes sans position T sur leurs appareils auditifs : utiliser le casque LPU1*

### Comment les utiliser ?

- 1 Fixer la boucle magnétique sous le comptoir avec le double face fourni, au plus proche de l'endroit auprès duquel se positionnera le visiteur
- 2 Positionner le microphone de table au plus proche de l'agent d'accueil et le relier à l'amplificateur (boîtier noir)
- 3 Relier au secteur l'amplificateur (boîtier noir)
- 4 Tester l'installation en utilisant le casque LPU1 (se positionner au-dessus de la boucle magnétique, simuler un échange avec l'agent d'accueil et écouter !)



*La position « T » d'un appareil auditif permet de se focaliser sur les sons captés par un microphone grâce au champ magnétique créé par le collier magnétique. La personne malentendante peut ainsi se concentrer sur la voix de son interlocuteur.*



## **Le Counterloop semble ne pas fonctionner :**

- Le Counterloop diffuse un champ magnétique dont le fonctionnement peut être perturbé par les lampes halogènes, les écrans d'ordinateurs. Dans la mesure du possible, ne le positionnez pas à proximité de ces sources parasites.
- Veillez à ce que le Counterloop soit bien branché sur une prise secteur.
- Référez-vous au mode d'emploi détaillé fourni avec le Counterloop.
- Veillez à ce que les fils rouge et bleu soit correctement insérés dans le counterloop.
- Veillez à ce que le casque LPU-1 soit chargé.

