



## CONSEILS D'UTILISATION DE LA SOLUTION COMFORT DUETT 2

**Installation :** Posez le Comfort Duett 2 sur le comptoir dans sa base de chargement reliée au secteur.  
Positionnez les autocollants fournis pour signaler l'accessibilité de votre établissement.

1 Retirez le Comfort Duett 2 de sa base de chargement. Veillez à le replacer après utilisation.

2 La personne est-elle équipée d'un appareil auditif avec la position « T » ?

→ Si oui : Attachez l'adaptateur de collier au Comfort Duett 2

(Insérez le clip situé à l'arrière du Comfort Duett 2 dans la boucle en caoutchouc de l'adaptateur)

Reliez l'adaptateur au Comfort Duett 2 par le câble d'interconnexion court

Reliez le **collier magnétique** à l'adaptateur, et demandez à la personne de le porter autour du cou et de positionner son appareil auditif sur « T ».



→ Si non : Reliez le **casque** au Comfort Duett 2, et demandez à la personne de le placer sur ses oreilles.



3 Mettez le volume sur 0 à l'aide du bouton « moins » du réglage son

Allumez en appuyant sur le bouton



## CONSEILS D'UTILISATION DE LA SOLUTION COMFORT DUETT 2

**Installation :** Posez le Comfort Duett 2 sur le comptoir dans sa base de chargement reliée au secteur.  
Positionnez les autocollants fournis pour signaler l'accessibilité de votre établissement.

1 Retirez le Comfort Duett 2 de sa base de chargement. Veillez à le replacer après utilisation.

2 La personne est-elle équipée d'un appareil auditif avec la position « T » ?

Si oui : Attachez l'adaptateur de collier au Comfort Duett 2

(Insérez le clip situé à l'arrière du Comfort Duett 2 dans la boucle en caoutchouc de l'adaptateur)

Reliez l'adaptateur au Comfort Duett 2 par le câble d'interconnexion court

Reliez le **collier magnétique** à l'adaptateur, et demandez à la personne de le porter autour du cou et de positionner son appareil auditif sur « T ».



Si non : Reliez le **casque** au Comfort Duett 2, et demandez à la personne de le placer sur ses oreilles.




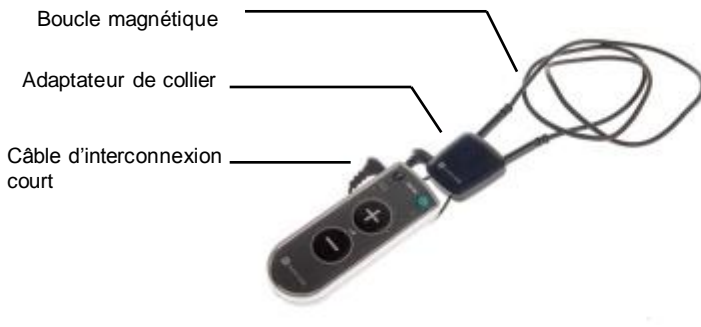
3 Mettez le volume sur 0 à l'aide du bouton « moins » du réglage son

Allumez en appuyant sur le bouton




4 La personne peut ajuster le volume et orienter le Comfort Duett 2 vers son interlocuteur (le microphone se situe sur sa partie supérieure).

5 Eteignez en appuyant de nouveau sur 




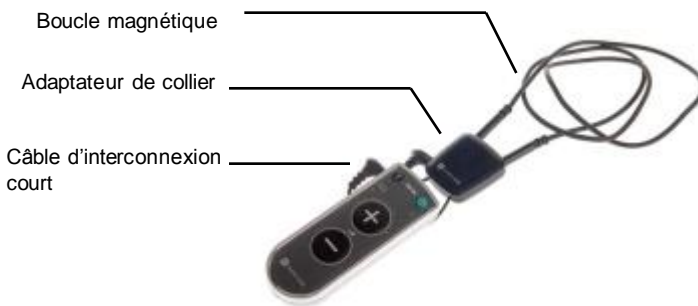
*La position « T » d'un appareil auditif permet de se focaliser sur les sons captés par un microphone grâce au champ magnétique créé par le collier magnétique. La personne malentendante peut ainsi se concentrer sur la voix de son interlocuteur.*

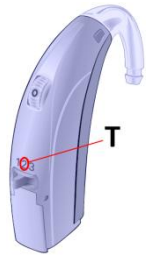


Tél : 09 81 83 04 10 – Fax : 09 81 70 76 08 - E-mail : [contact@surdicite.fr](mailto:contact@surdicite.fr)  
[www.surdicite.fr](http://www.surdicite.fr) - Retrouvez-nous également sur Facebook !

4 La personne peut ajuster le volume et orienter le Comfort Duett 2 vers son interlocuteur (le microphone se situe sur sa partie supérieure).

5 Eteignez en appuyant de nouveau sur 



*La position « T » d'un appareil auditif permet de se focaliser sur les sons captés par un microphone grâce au champ magnétique créé par le collier magnétique. La personne malentendante peut ainsi se concentrer sur la voix de son interlocuteur.*

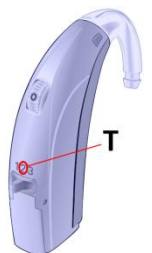

Tél : 09 81 83 04 10 – Fax : 09 81 70 76 08 - E-mail : [contact@surdicite.fr](mailto:contact@surdicite.fr)  
[www.surdicite.fr](http://www.surdicite.fr) - Retrouvez-nous également sur Facebook !