

Mode d'emploi : CMBT

Informations générales

Technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth autorise une connexion sans fil entre appareils de communication compatibles.

Les connexions Bluetooth ne nécessitent pas de contact visuel entre les appareils (par exemple entre le téléphone et le *CM-BT*).

Cependant les appareils ne doivent pas être éloignés de plus de dix mètres l'un de l'autre.

Des interférences dues à obstacles peuvent altérer la connexion, par exemple un mur ou d'autres appareils électroniques.

Le micro-casque *CM-BT* répond aux spécifications Bluetooth 1.2 et supporte les modules suivants :

- Headset HSP 1.1
- Handsfree (HFP) 1.0
- A/V (A2DP) 1.0 - Écouteurs stéréo

Se renseigner auprès des fabricants des autres appareils sur leur compatibilité avec le *CM-BT*. Il est possible qu'en certains lieux des réserves soient émises sur l'utilisation de la technologie Bluetooth. Se renseigner auprès des autorités compétentes ou du prestataire de services.

Packaging



Vérifiez si toutes les pièces énumérées ci-après sont bien présentes :

- Récepteur *CM-BT*
- Boucle magnétique (boucle inductive)
- 1 Accu (type LR03)
- Station de charge
- Bloc-secteur
- Pochette de transport
- Mode d'emploi
- Coupon de garantie

En cas de livraison incomplète veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Accessoires en option

Différents écouteurs, plaquettes d'induction, câbles pour prothèses et câbles allume-cigare.

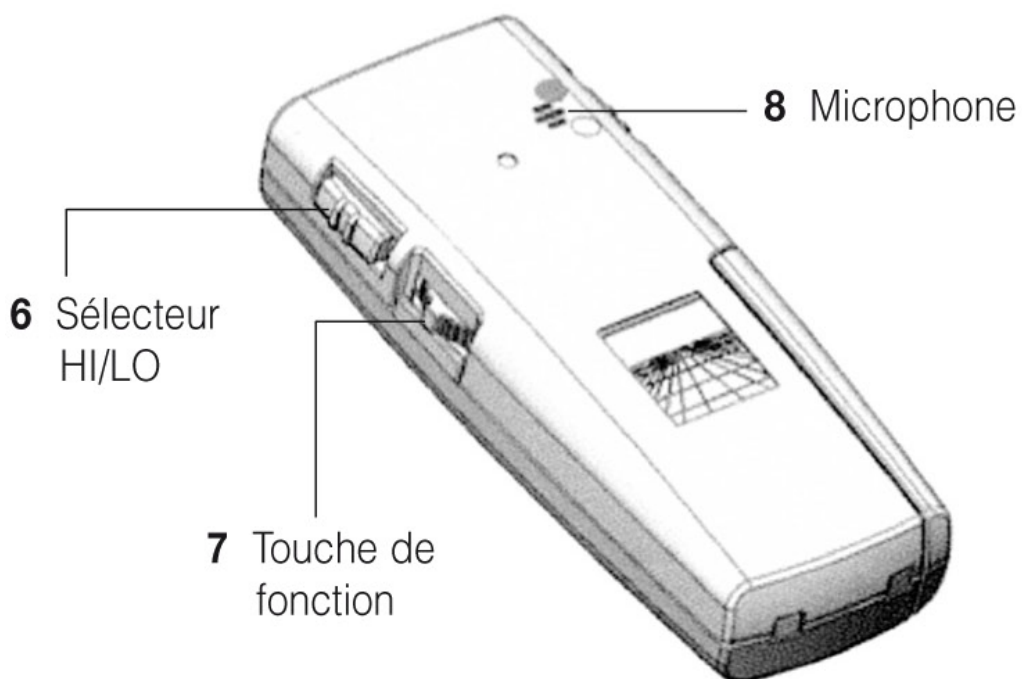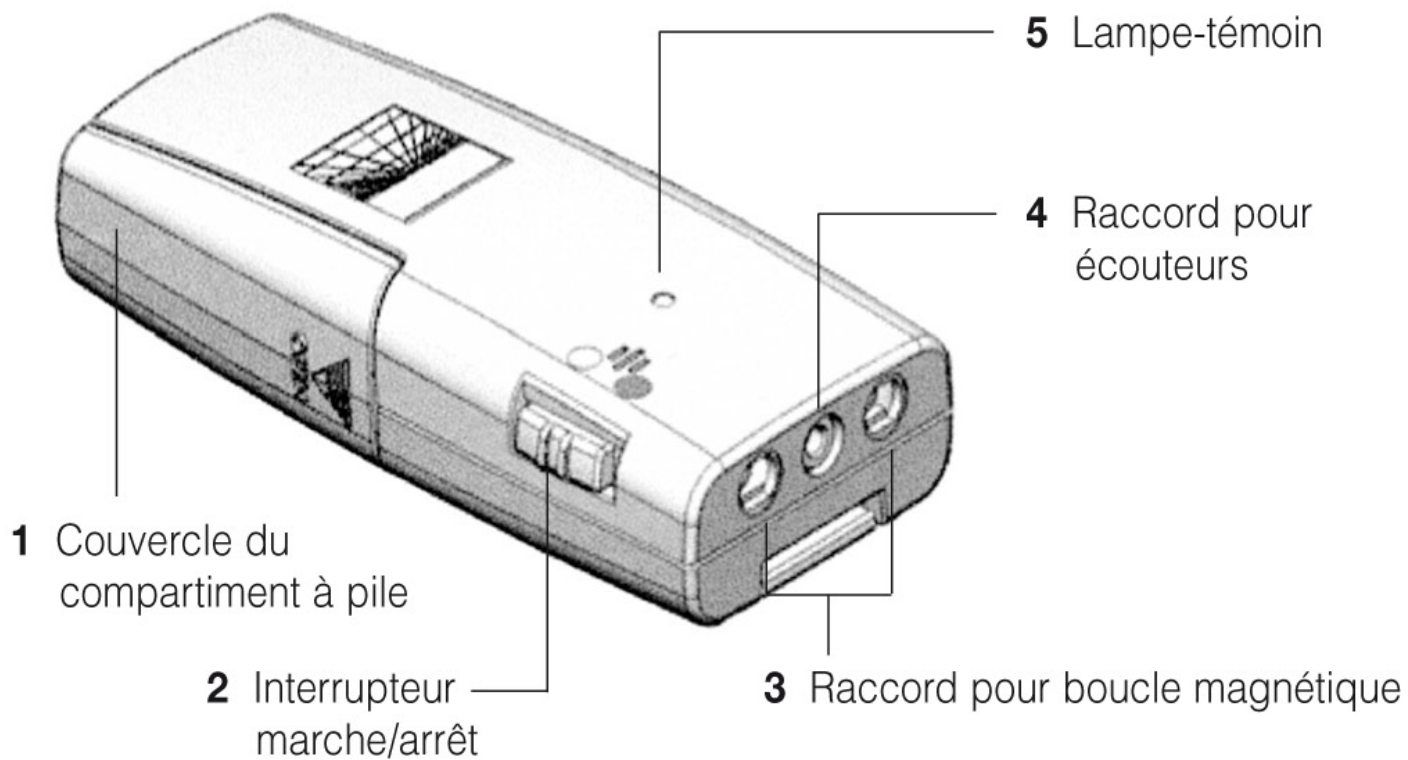

Mise en service

Description des éléments de commande

1 Couvercle du compartiment à pile

2 Interrupteur marche/arrêt

- marche
- o arrêt

3 Raccord pour boucle magnétique

4 Raccord pour écouteurs

5 Lampe-témoin

Rouge

Clignotement bleu/rouge

Clignotement bleu toutes les 3 secondes

Clignotement bleu rapide

→ Avertissement : Pile usée

→ Mode de couplage

→ Recherche de connexion

→ Connexion établie avec l'appareil

6 Sélecteur HI/LO

HI → Amplifie la retransmission des aiguës

LO → Amplifie la retransmission des graves

7 Touche de fonction

- Réglage du volume
- Touche de réception d'appel/de fin d'appel
- Touche de couplage

8 Microphone intégré

Raccordement de la boucle magnétique/des écouteurs


Le micro-casque *CM-BT* peut fonctionner de deux façons :

- par l'intermédiaire de la boucle magnétique fournie
- par l'intermédiaire d'écouteurs (non fournis)


La condition préalable à une retransmission correcte par boucle magnétique est que l'appareil auditif soit muni d'une bobine magnétique (position T).

La plupart des appareils auditifs disposent d'un petit commutateur (T/MT) permettant de régler le type de réception de l'appareil auditif.

Raccord pour boucle magnétique

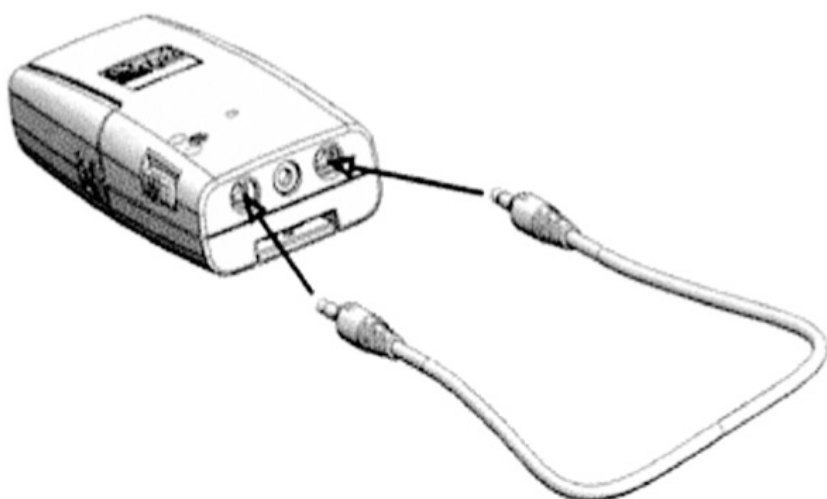

Raccord pour écouteurs

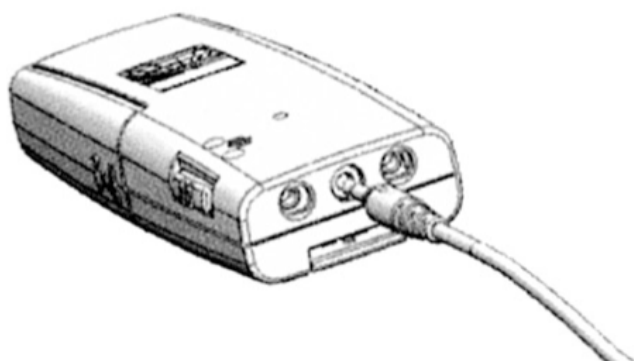

Placez l'accu (ou la pile)

Ne remplacer l'accu que par un accu d'origine en cas de besoin.

En cas d'utilisation du *CM-BT* avec une pile non rechargeable, il est interdit de placer l'émetteur dans la station de charge.



Respecter la polarité de la pile ou de l'accu à sa mise en place dans le compartiment à pile. Le sens d'insertion de la pile est représenté dans le fond du compartiment à pile.




Attention : l'accumulateur n'est pas suffisamment chargé à sa livraison et doit avant utilisation, être complètement chargé dans la station de charge.

1. Eteindre le *CM-BT*.
2. Oter le couvercle du compartiment à piles.
3. Placer l'accu fournis dans le compartiment à piles (en respectant leur polarité).
4. Refermer le compartiment à piles.
5. Placer le *CM-BT* sur la station de charge.

La LED verte de la station de charge scintille pendant toute la durée de la charge. L'accu est entièrement rechargé au bout de 12 heures.

Station de charge CM

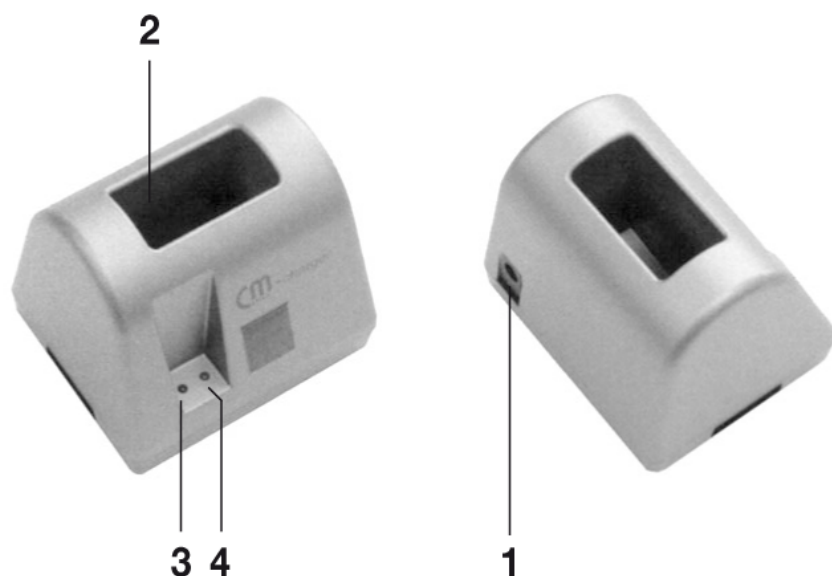

1 12 V Tension d'entrée

Prise de raccordement du bloc-secteur à la station de charge.

2 Boîtier du chargeur pour les composants

Boîtier de chargeur tripolaire destiné à recevoir le *CM-BT*.

3 LED (rouge) Indicateur de disponibilité

4 LED (verte) Indicateur de charge

Installation de la station de charge

1. Raccorder le bloc-secteur au réseau (230 volts).
2. Raccorder la station de charge CM au bloc-secteur en insérant la prise jack (ronde) du bloc-secteur dans la fiche DC au dos de la station de charge.



Activation/désactivation du *CM-BT*


Faire coulisser l'interrupteur marche/arrêt vers le haut (position ●).

Au bout de 3 secondes, l'appareil est prêt à être connecté. La lampe-témoin bleue clignote lentement. Si un appareil préalablement couplé se trouve à moins de dix mètres, le *CM-BT* s'y connecte automatiquement. Une fois le *CM-BT* connecté, la lampe-témoin bleue clignote rapidement.

Pour éteindre le *CM-BT*, faire coulisser l'interrupteur marche/arrêt vers le bas (position ○).

Couplage du *CM-BT* à un téléphone compatible

Afin de pouvoir utiliser le *CM-BT* avec le téléphone, il faut l'ajouter à la liste des appareils du téléphone. Suivre les indications du mode d'emploi du téléphone pour activer Bluetooth.

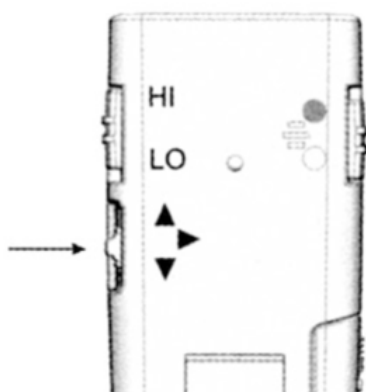

- 1 Allumer le téléphone et le *CM-BT*.
- 2 Activer le « mode de couplage » du *CM-BT* en maintenant la touche de fonction enfoncée pendant 6 secondes (la lampe-témoin clignote rapidement en alternant bleu et rouge).
- 3 Activer la fonction Bluetooth sur le téléphone et lancer la recherche d'appareils Bluetooth. Le mode d'emploi du téléphone donne des indications plus détaillées à ce sujet.
- 4 Sélectionner, dans la liste des appareils trouvés, le *CM-BT*.
Pour coupler le *CM-BT* au téléphone et établir une connexion entre les deux, taper le code « 0000 ».



Activation/désactivation du *CM-BT*


Faire coulisser l'interrupteur marche/arrêt vers le haut (position ●).

Au bout de 3 secondes, l'appareil est prêt à être connecté. La lampe-témoin bleue clignote lentement. Si un appareil préalablement couplé se trouve à moins de dix mètres, le *CM-BT* s'y connecte automatiquement. Une fois le *CM-BT* connecté, la lampe-témoin bleue clignote rapidement.

Pour éteindre le *CM-BT*, faire coulisser l'interrupteur marche/arrêt vers le bas (position ○).

Couplage du *CM-BT* à un téléphone compatible

Afin de pouvoir utiliser le *CM-BT* avec le téléphone, il faut l'ajouter à la liste des appareils du téléphone. Suivre les indications du mode d'emploi du téléphone pour activer Bluetooth.

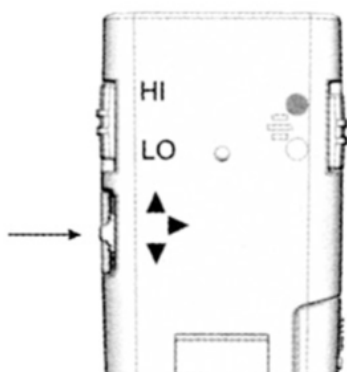

1 Allumer le téléphone et le *CM-BT*.

2 Activer le « mode de couplage » du *CM-BT* en maintenant la touche de fonction enfoncée pendant 6 secondes (la lampe-témoin clignote rapidement en alternant bleu et rouge).

3 Activer la fonction Bluetooth sur le téléphone et lancer la recherche d'appareils Bluetooth. Le mode d'emploi du téléphone donne des indications plus détaillées à ce sujet.

4 Sélectionner, dans la liste des appareils trouvés, le *CM-BT*.

Pour coupler le *CM-BT* au téléphone et établir une connexion entre les deux, taper le code « 0000 ».

Utilisation principale

Émission et réception d'appels téléphoniques

Pour téléphoner, utiliser le téléphone connecté au *CM-BT* comme habituellement. Utiliser les touches du téléphone ou appuyer sur la touche de fonction pour répondre à un appel. Pour refuser un appel entrant, appuyer deux fois rapidement sur la touche de fonction.

Utiliser les touches du téléphone ou appuyer sur la touche fonction pour mettre fin à un appel.

Utilisation du *CM-BT* comme écouteurs musicaux et téléphone

Lorsqu'un lecteur de musique est intégré au téléphone, le *CM-BT* permet d'écouter de la musique. En cas d'appel téléphonique, la musique s'interrompt et une sonnerie retentit dans le *CM-BT* ; il suffit alors d'appuyer sur la touche de fonction pour recevoir cet appel. Une fois l'appel terminé, la musique reprend.

Réglage du volume


Appuyer sur la touche de fonction vers le haut pour augmenter le volume ou vers le bas pour le baisser. Le volume se règle plus rapidement lorsque la touche de réglage choisie est maintenue enfoncée.



À chaque mise en service, faire bien attention à ce que le volume du *CM-BT* soit correctement réglé pour son utilisateur afin d'empêcher tout dommage dû à un volume trop élevé. Il suffit d'ajuster le volume sur une valeur faible.

Couplage du Bluetooth *CM-BT* à un ordinateur compatible

- 1 Allumer l'ordinateur et s'assurer que le matériel Bluetooth est activé.
- 2 Allumer le micro-casque *CM-BT*.

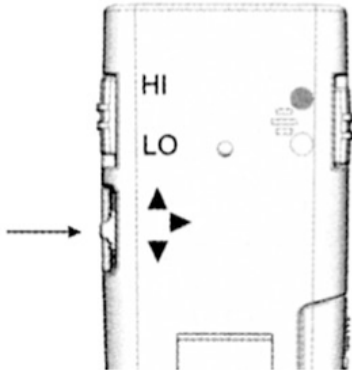

- 3 Activer le « mode de couplage » du *CM-BT* en maintenant la touche de fonction enfoncée pendant 6 secondes (la lampe-témoin bleue clignote rapidement).
- 4 Sur l'ordinateur, lancer la recherche d'appareils Bluetooth. Le mode d'emploi du logiciel PC-Bluetooth fournit de plus amples indications.

- 5 Sélectionner, dans la liste des appareils trouvés, le *CM-BT*.
Pour coupler le *CM-BT* à l'ordinateur et établir une connexion entre les deux, taper le code « 0000 ».

→ **Nous recommandons d'utiliser du matériel et un logiciel Bluetooth de la société Bluesoleil avec l'ordinateur. www.bluesoleil.com**

Nous ne pourrions malheureusement fournir aucune assistance téléphonique en cas de problèmes informatiques.

Annexe

Consignes de sécurité

Le *CM-BT* a été conçu selon les connaissances actuelles de la technique et selon les règles de sécurité généralement reconnues.

Respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne pas placer ou exposer l'appareil :
 - près d'une source de chaleur
 - aux rayons du soleil
 - à l'humidité
- Protéger l'appareil de l'humidité, de la poussière, des liquides corrosifs et des vapeurs.
- Ne brancher le câble de raccordement que sur les prises ou fiches prévues à cet effet.
- Ne raccorder que des accessoires homologués.
- Toute modification du système de communication, d'ordre technique ou autre, est interdite.
- Le système de communication *CM-BT* contient des éléments pouvant être avalés et n'est donc pas adapté aux enfants de moins de 36 mois.

En cas d'utilisation non conforme, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages matériels et corporels qui en résulteraient.

Maintenance et entretien

Le *CM-BT* est exempt de maintenance. S'il est sale, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ni d'autres solvants organiques.

Le *CM-BT* ne doit pas être exposé en plein soleil de façon prolongée et il doit être protégé contre une chaleur importante, l'humidité et de fortes vibrations mécaniques.

Important : Cet appareil **n'est pas** protégé contre les projections d'eau.

Ne pas poser d'objet rempli d'un liquide, par exemple un vase, près de l'appareil. De même, ne pas poser près de l'appareil une source de combustion comme par exemple une bougie allumée.

Veiller à ce que la pile ne soit pas exposée à des sources de chaleur importantes comme par exemple l'ensoleillement direct ou le feu.

Garantie

Tous les appareils *CM-BT* sont très fiables. Si en dépit d'un montage et d'un emploi corrects, des dysfonctionnements apparaissent, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou vous adresser directement au fabricant. La garantie comprend la réparation gratuite y compris la réexpédition. La seule condition est de renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine. Ne le jetez donc pas. Cette garantie ne s'applique pas pour des dommages occasionnés par une mauvaise manipulation ou encore des tentatives de réparation par des personnes non autorisées (endommagement du cachet signalétique de l'appareil). Les réparations sous garantie ne sont exécutées qu'après réception du coupon de garantie dûment rempli ou d'une copie de la facture ou du ticket de caisse du revendeur.

Le numéro de série de l'appareil doit être indiqué dans tous les cas.



Consigne environnementale/Gestion des déchets

Gestion des déchets électriques et électroniques (dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant d'un système de collecte distinct pour cette classe de déchets). Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté comme les déchets ménagers ordinaires, mais apporté à un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. En respectant ces règles pour votre équipement usagé, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement et de votre santé. Le non-respect de ces règles pour votre équipement usagé constitue une atteinte à l'environnement et une menace pour votre santé. Le recyclage des matériaux contribue à réduire la quantité de matières premières utilisées. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes, votre mairie ou le magasin où vous avez effectué votre achat.

Caractéristiques techniques

Dimensions :	18 x 37 x 95 mm (H x L x P)
Niveau de pression acoustique pour le fonctionnement avec écouteurs :	max. 118 dB
Poids :	40 g
Alimentation électrique :	1 x 1,2 V accu type LR03
Autonomie (en fonction de l'utilisation) :	max. 8-10 h

Le fonctionnement du micro-casque *CM-BT* décrit dans ce mode d'emploi a été testé sous Bluetooth PRD 2.0.

Le micro-casque *CM-BT* fonctionne sans problème avec presque tous les appareils compatibles Bluetooth.

Comme les logiciels de portable, les logiciels d'ordinateur ou les logiciels d'autres appareils Bluetooth peuvent être régulièrement actualisés, nous ne pouvons garantir la compatibilité de chaque version de logiciel.



Ce produit répond aux normes de l'Union européenne.
Les déclarations de conformité CE sont disponibles auprès de votre revendeur ou directement auprès du fabricant du produit.

Sous réserves de modifications techniques.

